

Гигиеническая обработка

Непрямых офтальмоскопов HEINE: OMEGA® 500, SIGMA® 250

Общие предупреждения и информация о безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести.



УКАЗАНИЯ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не связана с опасностью.

	<p>Следующая информация о гигиенической обработке должна применяться в соответствии с национальными стандартами, законами, руководствами и рекомендациями. Описанные меры гигиенической обработки не заменяют действующих правил компании.</p>
	<p>В случае подозрения на загрязнение необходимо провести гигиеническую обработку прибора.</p> <p>Компания HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG разрешает использовать только рекомендованные здесь средства и методы.</p> <p>Гигиеническая обработка должен проводить только человек, имеющий достаточный профессиональный опыт.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя применяемого средства обработки.</p> <p>Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.</p> <p>Перед гигиенической обработкой необходимо отключить прибор от источника питания.</p>
	<p>Убедитесь, что прибор полностью высох после обработки, прежде чем использовать его снова.</p>
<p>Ограничения при обработке</p>	<p>Периодически проверяйте целостность устройства.</p>



Дезинфекция салфетками

1. Подготовка

Выключите прибор и дайте ему остыть.

Снимите зеркало ассистента (если оно есть) и дезинфицируйте его отдельно.

2. Ручная очистка и дезинфекция



- Обратите внимание, чтобы все поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени воздействия, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости увеличьте количество процедур протирания.
- Очищайте и дезинфицируйте оптические поверхности только при необходимости с помощью дезинфицирующей салфетки. В противном случае, для удаления остатков, очистите их в соответствии с инструкцией " Очистка оптических частей Вашего прибора HEINE" (MED 234574)

Оснащение

- Дезинфицирующие салфетки:
спиртовые (например, Incides N или универсальные салфетки с микрозидом)
или
спиртовые + четвертичные аммониевые соединения (например, Super Sani-Cloth)
- Если вы используете не рекомендованные средства для обработки, убедитесь, что они не вспениваются.

Проведение

- Очищайте и дезинфицируйте прибор вручную.
- Особое внимание уделите труднодоступным участкам.
- Тщательно протрите места соприкосновения с пользователем: например, элементы управления, поворотные регуляторы, блокировочные элементы.
- Очистите подушки оголовья с помощью салфетки, смоченной водой, или, при необходимости, дезинфицирующей салфеткой.
- Очистите и продезинфицируйте учебное зеркало (при наличии) вручную с помощью спиртовой дезинфицирующей салфетки.
- Очищайте кабель и блок питания только при необходимости и только сухой тканью.
- Удалите остатки дезинфицирующего средства и насухо вытрите прибор в соответствии с требованиями производителя дезинфицирующего средства.

3. Контроль и тестирование функциональности



- Проверьте прибор на наличие видимых загрязнений или износа. При необходимости повторите обработку.
- Не используйте прибор при наличии видимых признаков повреждения.

4. Хранение

Храните таким образом, чтобы он был защищен от повторного загрязнения, пыли и влаги.



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG • Dornierstr. 6 • 82205 Gilching • Germany
E-Mail: info@heine.com • www.heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия
Уполномоченный авторизованный импортер и дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ.
Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtextst@yandex.ru

