

Гигиеническая обработка батареечных и перезаряжаемых рукояток HEINE

BETA® NT, BETA® 4 NT, BETA® 4 USB, BETA® L, большая батарейечная рукоятка, mini3000, BETA® 4 SLIM NT и BETA® SLIM

Общие предупреждения и информация по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ указывает на потенциально опасные ситуации. Игнорирование соответствующих указаний может привести к ущербу лёгкой и средней степени тяжести.



УКАЗАНИЕ! Этот символ используется для информации, которая важна, но не связана с опасностью.

	<p>Необходимо соблюдать инструкции по гигиенической обработке, основанные на национальных стандартах, законах и директивах. Описанные меры по гигиенической обработке не заменяют конкретных правил вашего учреждения/отделения.</p>
	<p>В случае возможного загрязнения проведите гигиеническую обработку инструмента.</p> <p>Компания HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG одобряет только вещества и процедуры, перечисленные в данной инструкции.</p> <p>Гигиеническую обработку должен проводить только человек, имеющий достаточный профессиональный опыт.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя по применяемым средствам обработки.</p> <p>Избегайте попадания жидкости в устройство.</p> <p>Перед началом обработки извлеките батарейку или аккумулятор из рукояток.</p>
	<p>Перед повторным использованием убедитесь, что прибор полностью высох после повторной обработки.</p>
<p>Ограничение по обработке</p>	<p>Периодически проверяйте целостность устройства.</p>



Дезинфекция протиранием

1. Подготовка

Выключите устройство и дайте ему остыть.

2. Ручная очистка и дезинфекция



Обратите внимание, чтобы все поверхности были полностью увлажнены в течение всего времени воздействия, указанного производителем дезинфицирующего средства. При необходимости увеличьте количество процедур протирания.

Оснащение

- Чистящее средство, при необходимости: ферментативное (например, neodisher MediClean)
- Дезинфицирующее средство:
- для рукоятки BETA (без SLIM): спиртовые (например, Incides N или универсальные салфетки mikrozid), четвертичные аммониевые соединения (например, Cleanisept Wipes, Mikrobac Tissues или Sani-Cloth AF3) или спиртовые + четвертичные аммониевые соединения (например, Super Sani-Cloth)
- для рукоятки BETA SLIM: спиртовые (например, Incides N или универсальные салфетки mikrozid)
- для ручек mini3000: четвертичные аммониевые соединения (например, салфетки Cleanisept, салфетки Mikrobac или Sani-Cloth AF3)

Проведение

- При сильном загрязнении можно сначала протереть салфеткой, смоченной чистящим средством, а затем продезинфицировать дезинфицирующей салфеткой.
- Очистите и продезинфицируйте устройство вручную протиранием.
- Обратите особое внимание на труднодоступные места.
- Тщательно протрите места соприкосновения.
- Для удаления дезинфицирующего средства и последующей сушки следуйте инструкциям производителя дезинфицирующего средства.

3. Контроль и тестирование функциональности



- Проверьте устройство на наличие видимых загрязнений или износа и при необходимости повторно обработайте его или утилизируйте в случае неустранимых загрязнений.

4. Хранение

Хранить в месте, защищённом от повторного загрязнения, пыли и влаги.



Генеральный партнёр HEINE в России и СНГ
Heimat 89 • 14165 Berlin • Germany
E-Mail: info@ttt-gmbh.com • www.ttt-gmbh.com
Tel: +49 151 15353792

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG | Dornierstr. 6 | 82205 Gilching | Deutschland

Тел.: +49 8105 7728 0 | Факс: +49 8105 7728 202 | Электронная почта: info@heine.com

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» | Дмитровское шоссе, 89 | 125504 Москва | Россия

Уполномоченный представитель, импортер и дистрибьютор HeineOptotechnik GmbH & Co. KG в РФ.

Тел.: +7 967 025-29-09, +7 929 646-55-05 | <https://shop.heine-med.ru> | Электронная почта: medtexst@yandex.ru

